

### Forma e estrutura

1. O conteúdo da embalagem: auscultador duplo, tubo em forma de Y, Binaural



- 1 - Olivas auriculares que se encaixam perfeitamente no ouvido
- 2 - Haste de metal resistente
- 3 - Barra reguladora de tensão
- 4 - Tubo de condução do som em Y
- 5 - Auscultador que repassa os sons internos do paciente

### Modo de uso

#### Como fixar o tubo auditivo

O tubo auditivo é rotacionado. Ajuste os orifícios dos fones para alinhar com a direção do tubo auditivo. Como referência, o ângulo padrão é de 18 graus.

Como os tubos auditivos estão montados de forma mais rígida, pode haver um ruído de fricção ("creak"), mas não é um sinal de defeito

#### Como fazer alterações entre diafragma e sino

É possível mudar o plano do diafragma para o plano do sino rotacionando o eixo, conforme mostrado na figura a seguir. Rotacione até sentir um clique. Quando a marca de alteração estiver visível, ele aplica o equipamento à superfície de ausculta. No caso do estado mostrado na figura a seguir. A ausculta é possível a partir do plano do diafragma.

#### Posição do fone

Para garantir conforto e maximizar o efeito do isolamento acústico, os tubos auriculares são colocados de forma fixa em um ângulo anatomicamente correto. Ao inserir nos canais auditivos, certifique-se de que os fones estejam voltados para frente.

#### Ajuste dos fones

A. Para reduzir a tensão da mola: Segure os tubos auriculares com ambas as mãos no local em que começa a capa do tubo e puxe-os na direção oposta suavemente. Atente-se para não separar demais os fones. Os fones se separam a cada puxada e, em seguida, devem voltar à posição quando os tubos forem soltos.

B. Para aumentar a tensão da mola: Segure os tubos auriculares como a base do fone, no local em que os tubos auriculares são cobertos pelo tubo e aperte suavemente os tubos auriculares até que os fones se cruzem.

### Como trocar as peças

- 1) Para trocar os fones, puxe-os para fora do binaural e, em seguida, encaixe o novo fone com segurança no lugar.
- 2) Um diafragma extra está incluído em sua compra. Remova o anel de plástico e é possível substituir o diafragma por um novo.

### Limpeza do auscultador e do diafragma

Para uma limpeza completa, limpe o auscultador com álcool isopropílico isopropílico ou água com sabão. Enxágue com água e seque todas as peças e superfícies com um pano macio e não abrasivo. Remova o diafragma do anel de retenção. Limpe o diafragma e o anel de retenção com um pano limpo e use água com sabão ou álcool isopropílico. Enxágue com água e seque todas as peças com um pano macio e não abrasivo separado antes de remontar.

### Uso geral e manutenção

- A. Evite calor, frio, solventes e óleos extremos.
- B. Não deixe exposto diretamente à luz solar por períodos prolongados.
- C. Todo o estetoscópio, incluindo o auscultador, o diafragma, o tubo e os fones intra-auriculares, pode ser limpo com álcool isopropílico ou água com sabão.
- D. Após a limpeza, certifique-se de enxaguar e secar bem todas as peças antes do armazenamento ou uso.
- E. Os fones podem ser removidos do binaural para uma limpeza mais completa.
- F. Nunca mergulhe o estetoscópio em qualquer líquido nem o submeta a métodos de esterilização.

### TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº \_\_\_\_\_

Data da Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### Queremos muito ouvir você!

CRM (Central de Relacionamento Multilaser Saúde)

**11 3198-5882**

Cobertura para todo o Brasil

Fale conosco via WhatsApp!



Importado por: Multilaser Industrial S.A. CNPJ: 59.717.553/0006-17  
R. Josepha Gomes de Souza, 382 - Pires, Extrema - MG, 37640-000

Fabricante: Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd  
NO. 1500 HAINING RD HAIBN LONGWAN ZONE, WENZHOU 325024  
CHINA

Responsável técnico: Lelius Lucca Braga - CREA/SP: 2608151337

Registro ANVISA nº 81596320040